



Kiilto Pro Innova 100

Terveydenhuollon konepesuaine



Tehokas, vaahtoamaton ja materiaalimyötäinen terveydenhuollon välineistön konepesuaine erityisesti vaativaan välinehuoltoon, jossa puhdistetaan monista eri materiaaleista valmistettuja instrumentteja ja välineistöä.

Käyttökohteet

Terveydenhuollossa käytettävät instrumentit ja hoitovälineet, joiden materiaalina esim. ruostumaton teräs, erilaiset muovit, silikoni ja kumi. Korroosiolta suojaavien ominaisuuksiensa ansiosta voidaan käyttää jopa alumiinille ja eloksoidulle alumiinille. Soveltuu hyvin myös suun terveydenhuollon välineistön koneelliseen pesuun.

Lääkinnällinen laite, ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Tehokas, vaahtoamaton ja materiaalimyötäinen terveydenhuollon välineistön konepesuaine erityisesti vaativaan välinehuoltoon, jossa puhdistetaan monista eri materiaaleista valmistettuja instrumentteja ja välineistöä.

Pakkausvaihtoehdot varmistavat yhteensopivuuden erilaisiin pesu- ja desinfiointikonemalleihin keskittyissä välinehuolloissa sekä pienemmissä yksiköissä.

Käyttö- ja annostusohje

Pesuaineastia liitetään pesukoneen automaattiseen annostelulaitteistoon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ohjeellisena annostuksena 0,20 - 0,50 % pitoisuus. Annostuksen määrään vaikuttavat pestävä materiaali sekä veden laatu. Pesulämpötilasuositus n. 55°C, käyttö lämpötilavälillä 40 - 80°C.

Noudata instrumenttivalmistajien erityisohjeita.

Lajittele välineistö asianmukaisesti telineisiin ja aseta pestävät instrumentit koneeseen. Pesukoneen vesisuihkujen on päästävä esteettömästi pestävän välineistön kaikille pinnoille. Kone ottaa pesuaineet pesuohjelmien mukaisesti. Pesulaite lämpödesinfioi puhdistetun välineistön ja koneen sisäosat.

Jos koneessa on käytetty aiemmin muuta pesuainetta, letkut huuhdellaan vedellä huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Vesihuuhtelu on suositeltavaa myös kanisterien vaihtojen yhteydessä.

Pese täydet koneelliset mikäli mahdollista. Pyri noudattamaan suositeltuja pesuaine annostuksia. Energian säästämiseksi, käytä mahdollisimman alhaista pesulämpötilaa, suositus n. 55C.

Huomioitavaa

Tuote luokitellaan lääkitelliseksi laitteeksi (luokka I).

5 litran pakkauskooko tuotekoodi 8235 on ns. eurokanisteri (matala kanisterimalli).

Koostumus**Tehoaine****Vaikutus**

Kaliummetasiliikaattia	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja
Kompleksinmuodostajia	5 - 15 %	sitovat veden kovuustekijöitä
Polykarboksylaattia	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa ja sitoo sen veteen
Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta
Kaliumhydroksidia	< 5 %	pH säätelijä, emäs, irrottaa likaa
Amfoteerisiä tensidejä	< 5 %	pesuteho

Tuotteen pH

12.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

11.0 emäksinen

Varastointi

5 - 25°C, 2 v. valmistusajankohdasta

Valmistusmaa

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus**

Kiilto Innova 100 konepesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelppoinen ja poltettava materiaali. Tuotetta ei saa päästää suoraan ympäristöön.

**Pakkaukoko /
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN	eurocanister
3x5l Eur	8235	6417964082357	6417964486162	
3 x 5 l	8229	6417964082296	6417964485202	
1 x 200 l	8228	6417964082289		

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.